

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

## 40331: Brandvertragend verzwaard schootdeken Anne-Lore® (granulaat)

*Verzwaringsartikelen worden gebruikt als rustgevend hulpmiddel voor mensen die onderhevig zijn aan stress en angst gerelateerde factoren of voor mensen met slaapproblemen. Een verzwaringsdeken kalmeert op dezelfde manier als een knuffel zou doen. Studies van het gebruik van verzwaringsartikelen hebben uitgewezen dat ze bij sommige patiënten de noodzaak van fixatiemiddelen en medicatie verminderen.*

Een verzwaringsartikel dat gevuld is met granulaat volgt perfect de contouren van het lichaam. Het heeft bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt om genoeg druk uit te oefenen, zodat het artikel op zich niet echt dik hoeft te zijn. Dit is praktisch in een warme omgeving en makkelijk in onderhoud.



**Md 40331/3<sup>TS</sup>:** Dagdeken in kwal. 1010, kleur: blauw, afm. 125/70 cm, 3 kg



**Md 40331/4,5<sup>TS</sup>:** Dagdeken in kwal. 1010, kleur: groen, afm. 125/70 cm, 4,5 kg.

### Doel :

- Angst en stress verminderen
- Onrust en prikkelbaarheid verzachten
- Concentratie verbeteren.

### Opgepast:

- De combinatie van een verzwaringsdeken en een verminderde longcapaciteit of een zwak spierstelsel kan een risico inhouden. Volg het gebruik van de dekens in dat geval van nabij op. Of raadpleeg een arts in geval van twijfel.
- Houd rekening met struikelgevaar indien een verzwaringsdeken op de grond is gevallen.

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.<sup>TS</sup>

### Richtlijn voor gebruik:

Leg het schootdeken over de benen in lengte –of breedterichting afhankelijk van de houding in de zetel. Vouw het deken dubbel voor meer lokale druk.

*Kwaliteit :* 1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, hoge scheurweerstand  
*Vulling:* brandvertragend kunststof granulaat

De verzwaringsartikelen zijn gemaakt uit een brandvertragende stof.

### Wasvoorschrift van verzwaringsartikelen:

- 1. Wassen* Separaat wassen op 60°C zacht programma met weinig wasmiddel in een waszak. Dekbedden met een gewicht van meer dan 6 kg zijn deelbaar en elk deel kan hierdoor afzonderlijk gewassen worden.
- 2. Spoelen* GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
- 3. Drogen* Zeer kort op lage temperatuur in een waszak in de droger of hangend drogen. Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).

